

# **ASBAGEN NEBALERICKÝ, STERILNÍ , VSTRĚBATELNÝ KOŇSKÝ KOLAGEN PRO DENTÁLNÍ POUŽITÍ**

**Popis výrobku:** ASBAGEN je hemostatický výrobek z čištěného koňského kolagenu. Je ve formě lyofilních čtverečků, sterilní, analogický, vstřebatelný. Specifickou vlastností kolagenu je hemostatická aktivita, když se kolagen dostává do kontaktu s krví, dochází k agregaci krevních destiček (trombocytů), které aktivují srážení. Současně s funkcí plazmy se zrychluje tvorba fibrinu a tím i koagulace (srážení). Díky enzymatické degradaci je ASBAGEN plně vstřebán během tří týdnů.

**INDIKACE:** Asbagen se používá pro hemostázi v dentální chirurgii, implantologii a v periodontologii, pro kontrolu kapilárního krvácení, krvácení parenchymatických a vaskulárních buněk. Asbagen se indikuje pro zajištění hemostatické

stabilizace sraženin. Dále podporuje hojení a regeneraci kostí.  
**KONTRAINDIKACE:** ASBAGEN nepoužívejte na povrch kostí, kde se musí použít metylmetakrylátové lepidlo, protože narušuje jeho účinek. **ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ:** sterilizací v autoklávu dojde k hydrolytickému poškození Asbagenu. Z tohoto důvodu je nutné nepoužité čtverečky po vyjmutí ze sterilního balení zlikvidovat. Asbagen je sterilizován Gama zářením, sterilita je zaručena jen u nepoškozeného obalu. Nenanášejte na infikované rány. Balení uchovávejte v suchém místě a v chladu.

**Návod k použití:** lehkým tlakem naneste přímo na krvácející povrch. Čtverečky v případě potřeby vystřihněte na požadovanou velikost. Množství čtverečků a dobu zatlačení přizpůsobte druhu a intenzitě krvácení. Doba k vytvoření hemostáze závisí na druhu

chirurgického zásahu a předcházejícího ošetření: zpravidla 2 – 4 minuty. Ve vlhkém stavu se ASBAGEN nerozloží.

**Balení:** ASBAGEN je dodáván ve formě lyofilních čtverečků ve dvojitěm balení: vnitřní ve dvojitěm polyetylenu, vnější v papírovém polyetylenovém obalu. Jedno balení obsahuje 60 čtverečků 1 x 1 cm, 10 kusů je vždy jednotlivě v blistrové folii.

**Výrobce:** La Maison Dentaire SA;  
**FL-9496 Balzers**  
Export a marketing: MEDIREL SA  
CH-6982 Agno, E mail:  
info@medirel.ch

**Dovoz a distribuce v ČR:**  
GLAX s.r.o., Malodoubská 502,  
460 08 LIBEREC [www.glax.eu](http://www.glax.eu);  
[info@glax.eu](mailto:info@glax.eu)