

# CONTROL

STABILIZOVANÝ  
VÁPENATÝ

HYDROXID

HYDROXYD VÁPENATÝ obsažený ve výrobku CONTROL vytváří svým vysokým alkalickým pH nesnášenlivé prostředí pro růst bakterií a zároveň stimuluje mechanismus tvorby tvrdých tkání.

**Vlastnosti:** pH 12, snadná aplikace zahnutými jednorázovými jehlami, radioopakní, bez zápachu

**Indikace a návod k použití:** ochranný lak pro kavity:

1. Naneste velmi slabou vrstvičku CONTROL na dentin

2. Vysušte pomalým proudem vzduchu (30 sekund), dokud materiál nevytvoří bílou, jakoby křídovou vrstvičku

3. Odstaňte CONTROL z okrajů sklovin

PŘÍMÉ PŘEKRYTÍ PULPY

1. naneste velmi tenkou vrstvičku CONTROL na všechna exponovaná místa a vysušte pomalým proudem vzduchu

2. naneste 2 – 3 mm silnou vrstvu CONTROL a pomalým proudem sušte tak dlouho, dokud se nevytvoří krusta

3. Pro jistotu lehce zkuste vatovou tyčinkou, zda se vytvořil kontakt s pulpou

4. Na CONTROL naneste zinkofosfátový cement

5. Proveďte finální plnění

OŠETŘENÍ KOŘENŮ

1. Důkladně připravte a vyčistěte kanálek 2. Jehlu vložte přímo do kanálku 3. Vyplňte kanálek

kompletně prostředkem CONTROL 4.

Uzavřete provizorně přístupový otvor 5. CONTROL se snadno odstraňuje pilníkem a vypláchně vodou

**Výrobce: La Maison Dentaire SA; FL-9496 Balzers**

Export a marketing: MEDIREL SA  
CH-6982 Agno, Švýcarsko

E mail: info@medirel.ch

**CE**

**0459**

**Dovoz a**

**distribuce v ČR:**

GLAX s.r.o., Malodoubská 502,  
460 08 LIBEREC

[www.glax.eu](http://www.glax.eu);

[info@glax.eu](mailto:info@glax.eu)