

IMPRESIL

Liquid dam = tekutá hráz

Oblast použití: nehřejivá tekutá hráz. Jedná se o jedinečný přípravek, navržený pro eliminaci problémů spojených s laky materiálů obvyklých tekutých hrází.



Při léčení nevzniká teplo, nízká exotermická reakce eliminuje pálení, bolest a poskytuje pohodlí pacientovi. **Nestéká.** IMPRESIL se může aplikovat před výkonem i přes

více zubů. Tím se omezují opakované kroky a procedury vícenásobného výkonu se světlem. **Zůstává flexibilní i po výkonu.** Vynikající náhrada koffer-damu, tento materiál je snadno zpracovatelný a odolný proti protržení.



aplikujte IMPRESIL dam na dásně nebo zuby před bělením, pískováním nebo jinými výkony, které vyžadují intraorální ochranu. Používá se k ochraně spodního řezu před snímáním otisků.

Postup použití:

1. Nasadíte 20-gauge jehlu na luer zámek stříkačky.
2. Naneste vrstvičku 1 – 2 mm IMPRESILu na dásně nebo povrch

zubů, který chcete chránit, nebo naneste při korekturách nerovností před nasazováním korunek a můstků.

3. Nechte tvrdnout pod světlem lampy asi 10 sekund.

Obsah balení: 3 stříkačky po 3 ml

Upozornění: jedná se o zdravotnický prostředek určený k použití pouze ve zdravotnictví. Chraňte před dětmi. Po uplynutí expirace nepoužívejte.

Výrobce: La Maison Dentaire SA; FL-9496 Balzers

Export a marketing: MEDIREL SA, Rondello, CH-6982 Agno, Švýcarsko E mail: info@medirel.ch

CE

Dovoz a distribuce v ČR:
GLAX s.r.o., Malodoubská 502,
460 08 LIBEREC

WWW.GLAX.EU

info@glax.eu