

# Rocanal Irrigation

Hydroalkoholický roztok pro dentální použití čištění a vyplachování kořenových kanálků.

## Složení:

Benzethonii Chloridum  
.....0,2 g

Phenoxyethanolum  
.....2,0 g

Alcool  
isopropylique.....10,0 g

Edetate disodique  
EDTA.....0,2 g

Blu di  
methylene.....0,25 ml

Acqua depurata.....qb  
100,0 ml

## ZPŮSOB POUŽITÍ:

ROCANAL IRRIGATION čistí, lubrifikuje a vyplachuje kanálek během jediného zákroku. Tento výrobek není dráždivý a nevyvolává bolest ani natékání. Balení je zajištěno proti kontaminaci.

## NÁVOD K POUŽITÍ

Snadné použití běžnou anesteziologickou stříkačkou.

## ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Určeno pouze pro dentální použití. Uchovávejte v chladnu. Používejte sterilní

materiál. POZOR:  
NEPOUŽÍVAT injekční.  
Nežádoucí vedlejší účinky:  
žádné

Balení: 50 ampulí po 1,8 ml

**Výrobce:** La Maison  
Dentaire FL-9496 Balzers

---

Export a marketing:  
MEDIREL SA  
CH-6982 Agno, Switzerland  
E mail: [info@medirel.ch](mailto:info@medirel.ch)

## Dovoz a distribuce v ČR:

GLAX s.r.o.  
Malodoubská 502  
460 08 LIBEREC  
[www.glax.eu](http://www.glax.eu); [info@glax.eu](mailto:info@glax.eu)

CE 0459