


Rocanal R3

Permanent Gangrene

Permanentní cement pro plnění kořenových kanálků doporučujeme používat po kompletní preparaci gangrenózního kanálku.


ROCANAL R3 se skládá z tekutiny (5 ml): alkoholický roztok eugenolu a prášku (8 ml): oxid zinku, titanium oxid, OPP (orthofenylfenol), nitrofurazon a kalcium wolframat, připravuje se před použitím (viz dále „návod k přípravě“).

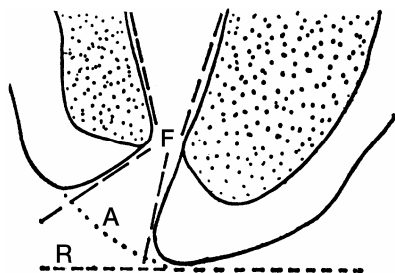

F = fyziologický otvor = konec pulpy

A = anatomické zúžení = konec zubu

R = radiologické zúžení = viditelné

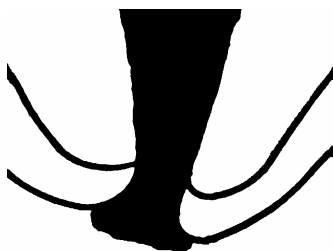

Plnění kořenového kanálku po ošetření nevitálního zubu (dosahuje anatomického zúžení a jde lehce přes).

Trvalé plnění kanálku je poslední krok v ošetřování gangrenózního zubu. Gangrenózní zub na rozdíl od zdravého má infikovanou apikální oblast kanálku, kanálek je napadený gram-pozitivními a gram-negativními bakteriemi; pulpa je nekrotická. Obrana proti bakteriálnímu napadení se vytváří především v silně prokrvené oblasti periodontia. Přírodní bariéru v kanálku tvoří hranice mezi dentinem a kořenového cementu.

Diagnóza: rentgen/ symptomy onemocnění.

Chronický případ: barva zubu se ztrácí, negativní test vitality, velká plnění, v minulosti akutní příhoda, fistula.

Akutní případ: periodontální bolest na tlak, subperiostální nebo podtkáňový váček

Obecné principy

- kanálek nenechávat nikdy otevřený

- preparaci kořenového kanálku dělejte kompletní, jinak přes špičku kanálku může lehce proniknout infekce. Čištění kanálku během jedné návštěvy.

- Zkontrolujte, zda se nevyskytují hluboké paradontální kapsy (mohou dosáhnout až k apexu a vytvořit periapikální váček.

Zatímco u vitálního zubu je definitivní ošetření během jedné návštěvy, u gangrenózního zubu je nutné léčení ve více krocích.

OPERATIVNÍ POSTUP

První sezení:

1. Odstraňte zbytky pulpy infikovaného kanálku i apexu mechanicky a chemicky (antisepticky) pro zabránění kontaminace

2. Provizorní medikamentózní vložka pro zabránění reakce v periapikální oblasti.

Druhé sezení:

Finální plnění kořenového kanálku i apexu (anatomického zúžení nebo lehce přes něj). Použijte ROCANAL PERMANENT GANGRENE.

ROCANAL R3 byl vyvinut speciálně pro gangrenózní zuby a má stejné vlastnosti jako ROCANAL R2.

Další vlastnosti ROCANAL R3 oproti R2:

1. Zabraňuje kontaminaci zbytků pulpy, které nemohly být beze zbytku odstraněny.

2. Při přeplnění nezpůsobuje reakci s periapikální tkání.

ROCANAL PERMANENT GANGRENE není dráždivý vůči periapikálním tkáním, v kanálku se nevstřebává, v případě přeplnění je pomalu reabsorbován pouze v periapikální oblasti.

NÁVOD K PŘÍPRAVĚ ROCANAL R2

1. Použijte sterilní míchací podložku a dvě sterilní flexibilní špachtle (jedna pro prášek, druhá pro míchání).

2. Dejte jednu nebo dvě kapky tekutiny a malé množství prášku na podložku.

3. Pomalu smíchejte prášek s tekutinou lehkým tlakem špachtle.

4. Míchejte tak dlouho, dokud nevytvoříte krémovou bezkrystalickou směs (krystaly přítomné v prášku jsou rozpustné v tekutině).

5. Postupujte obvyklou plnicí technikou

Všeobecná upozornění:

Uchovávejte v chladnu. Používejte sterilní materiál. Nežádoucí vedlejší účinky: žádné

Výrobce:

La Maison Dentaire SA
FL-9496 Balzers
Export a marketing: MEDIREL SA
CH-6982 Agno
E mail: info@medirel.ch

Dovoz a distribuce v České republice:

GLAX s.r.o.
Malodoubská 502
460 08 LIBEREC
www.glax.eu

info@glax.eu

CE 0459